



Zubehörkatalog

Your Companion  
Life Science Separation



# Inhaltsverzeichnis

<b>Bestimmung des richtigen Gewindes</b>	<b>S. 3</b>
<b>Auswahl des passenden Zubehörs</b>	<b>S. 4</b>
<b>Zubehör i3 ONE</b>	<b>S. 5-17</b>
<b>Zubehör i3 TWO</b>	<b>S. 18-19</b>
<b>Zubehör i3 FOUR</b>	<b>S. 20-24</b>
<b>Zubehör i3 FIVE</b>	<b>S. 25-31</b>
<b>Übersicht Zubehör</b>	<b>S. 32-35</b>

3

ONE

## Bestimmung des richtigen Gewindes

Für die Bestimmung des passenden Gewindes lösen Sie den Strahlregler vom Wasserhahn, den Duschkopf vom Duschschlauch oder den Flexschlauch vom Eckventil. Sie sehen dann bereits, ob es sich um ein Außen- oder ein Innengewinde handelt (an das das Zubehör montiert werden soll).

Wasserhähne haben in der Regel ein **Feingewinde**, hier liegen die Gewindegänge eng zusammen.

Ein **Grobgewinde** oder auch Rohrgewinde finden Sie immer an Schläuchen, wie zum Beispiel dem Duschschlauch. Hier liegen die Gewindegänge weiter auseinander.

### Messen eines Außengewindes

Messen Sie mit einem Lineal oder einem Messschieber den äußeren Durchmesser des Gewindes, wie in der folgenden Abbildung zu sehen und lesen Sie das Maß ab:



### Messen eines Innengewindes

Messen Sie mit einem Lineal oder einem Messschieber den inneren Durchmesser des Gewindes, wie in der folgenden Abbildung zu sehen und lesen Sie das Maß ab:



## Auswahl des passenden Zubehörs

Nachdem Sie sowohl das Gewinde bestimmt haben (Außen- oder Innengewinde), die Differenzierung zwischen Fein- oder Grobgewinde vorgenommen haben und Sie das Gewindemaß kennen, können Sie mit Hilfe der folgenden Übersicht das passende Zubehör für Ihren i3 Sterilfilter auswählen.

Feingewinde z.B. Wasserhahn					
Außengewinde			Innengewinde		
Außendurchmesser*	Gewinde	Benötigtes i3 Zubehör	Innendurchmesser*	Gewinde	Benötigtes i3 Zubehör
16,3 mm	M16,5 AG	Seite 7	14,9 mm	M16 IG	Seite 6
17,9 mm	M18 AG	Seite 8	20,9 mm	M22 IG	Seite 12
18,3 mm	M18,5 AG	Seite 9	20,9 mm	M22 IG	Seite 13
19,9 mm	M20 AG	Seite 10			
21,3 mm	M21,5 AG	Seite 11			
23,9 mm	M24 AG	Seite 14			
23,9 mm	M24 AG	Seite 15			
26,9 mm	M28 AG	Seite 16			

Grobgewinde z.B. Duschschlauch					
Außengewinde			Innengewinde		
Außendurchmesser*	Gewinde	Benötigtes i3 Zubehör	Innendurchmesser*	Gewinde	Benötigtes i3 Zubehör
16,7 mm	G3/8" AG	Seite 19, 26	15,2 mm	G3/8" IG	---
20,8 mm	G1/2" AG	Seite 19, 22, 27	19 mm	G1/2" IG	Seite 23, 28
26,3 mm	G3/4" AG	Seite 29	24,3 mm	G3/4" IG	Seite 30

\* : von Ihnen gemessen

## Zubehör i3 ONE






## Zubehör i3 ONE

### Wasserhahn

<b>Bezeichnung:</b>	<b>M16 F Connector ONE (AS)</b>
<b>Artikelnummer:</b>	S206015
<b>Beschreibung:</b>	Schnellverschlusskupplung mit M16x1 Innengewinde inklusive AquaStopp Funktion*
<b>Kompatibilität:</b>	i3 ONE Sterilfilter
<b>Anwendung:</b>	Wasserhahn mit einem M16x1 Außengewinde
<b>Material:</b>	Edelstahl (Hauptkörper)
<b>Lieferumfang:</b>	1x M22 F Connector ONE (AS) 1x M16 F Adaptor 1x M22 Flachdichtung 1x M16 Flachdichtung
<b>Installation:</b>	Der Zusammenbau und die Montage der Bauteile muss durch technisches Fachpersonal erfolgen

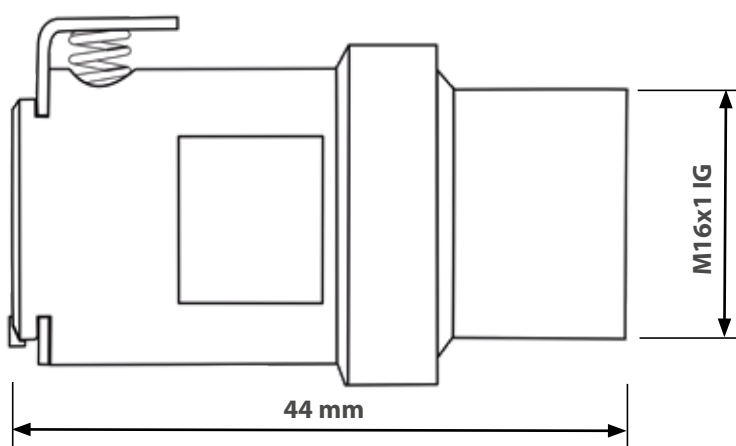


\*Die AquaStopp Funktion verhindert ein ungewolltes Austreten des Wassers, wenn kein Filter installiert ist.  
Variante ohne AquaStopp : Artikelnummer S206015nAS



## Zubehör i3 ONE

### Wasserhahn

<b>Bezeichnung:</b>	<b>M16.5 M Connector ONE (AS)</b>
<b>Artikelnummer:</b>	S206024
<b>Beschreibung:</b>	Schnellverschlusskupplung mit M16,5x1 Außengewinde inklusive AquaStopp Funktion*
<b>Kompatibilität:</b>	i3 ONE Sterilfilter
<b>Anwendung:</b>	Wasserhahn mit einem M16,5x1 Innengewinde
<b>Material:</b>	Edelstahl (Hauptkörper)
<b>Lieferumfang:</b>	1x M22 F Connector ONE (AS) 1x M16,5 M Adaptor 1x M22 Flachdichtung
<b>Installation:</b>	Der Zusammenbau und die Montage der Bauteile muss durch technisches Fachpersonal erfolgen

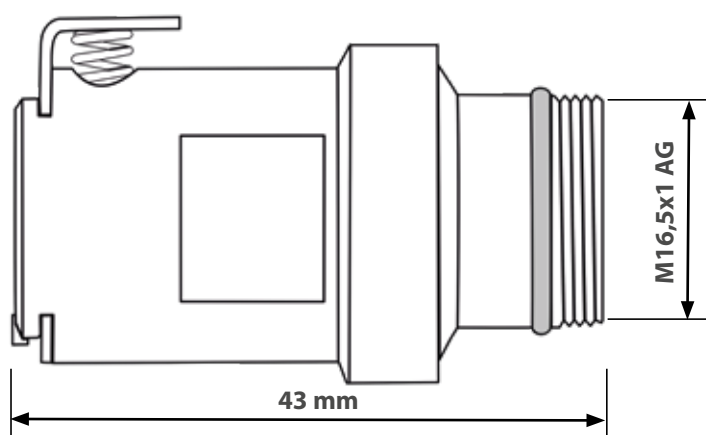


\*Die AquaStopp Funktion verhindert ein ungewolltes Austreten des Wassers, wenn kein Filter installiert ist.  
Variante ohne AquaStopp : Artikelnummer S206024nAS



## Zubehör i3 ONE

### Wasserhahn

<b>Bezeichnung:</b>	<b>M18 M Connector ONE (AS)</b>
<b>Artikelnummer:</b>	S206013
<b>Beschreibung:</b>	Schnellverschlusskupplung mit M18x1 Außengewinde inklusive AquaStopp Funktion*
<b>Kompatibilität:</b>	i3 ONE Sterilfilter
<b>Anwendung:</b>	Wasserhahn mit einem M18x1 Innengewinde
<b>Material:</b>	Edelstahl (Hauptkörper)
<b>Lieferumfang:</b>	1x M22 F Connector ONE (AS) 1x M18 M Adaptor 1x M22 Flachdichtung 1x M18 Flachdichtung
<b>Installation:</b>	Der Zusammenbau und die Montage der Bauteile muss durch technisches Fachpersonal erfolgen

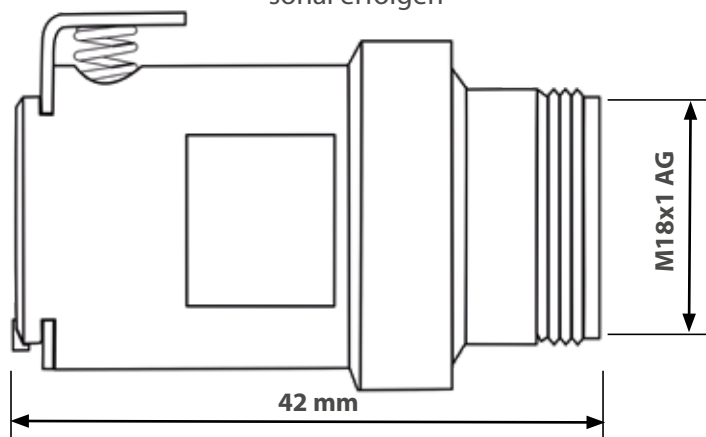

\*Die AquaStopp Funktion verhindert ein ungewolltes Austreten des Wassers, wenn kein Filter installiert ist.  
Variante ohne AquaStopp : Artikelnummer S206013nAS






## Zubehör i3 ONE

### Wasserhahn

<b>Bezeichnung:</b>	<b>M18.5 M Connector ONE (AS)</b>
<b>Artikelnummer:</b>	S206012
<b>Beschreibung:</b>	Schnellverschlusskupplung mit M18,5x1 Außengewinde inklusive AquaStopp Funktion*
<b>Kompatibilität:</b>	i3 ONE Sterilfilter
<b>Anwendung:</b>	Wasserhahn mit einem M18,5x1 Innengewinde
<b>Material:</b>	Edelstahl (Hauptkörper)
<b>Lieferumfang:</b>	1x M22 F Connector ONE (AS) 1x M18.5 M Adaptor 1x M22 Flachdichtung
<b>Installation:</b>	Der Zusammenbau und die Montage der Bauteile muss durch technisches Fachpersonal erfolgen

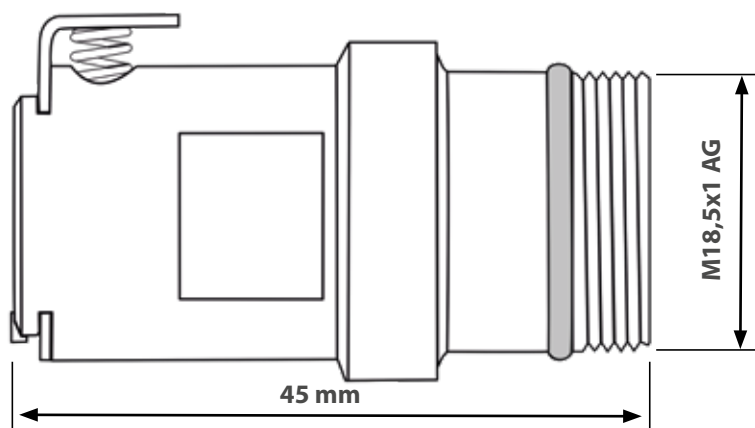


\*Die AquaStopp Funktion verhindert ein ungewolltes Austreten des Wassers, wenn kein Filter installiert ist.  
Variante ohne AquaStopp : Artikelnummer S206012nAS



## Zubehör i3 ONE

### Wasserhahn

<b>Bezeichnung:</b>	<b>M20 M Connector ONE (AS)</b>
<b>Artikelnummer:</b>	S206020
<b>Beschreibung:</b>	Schnellverschlusskupplung mit M20x1 Außengewinde inklusive AquaStopp Funktion*
<b>Kompatibilität:</b>	i3 ONE Sterilfilter
<b>Anwendung:</b>	Wasserhahn mit einem M20x1 Innengewinde
<b>Material:</b>	Edelstahl (Hauptkörper)
<b>Lieferumfang:</b>	1x M22 F Connector ONE (AS) 1x M20 M Adaptor 1x M22 Flachdichtung
<b>Installation:</b>	Der Zusammenbau und die Montage der Bauteile muss durch technisches Fachpersonal erfolgen

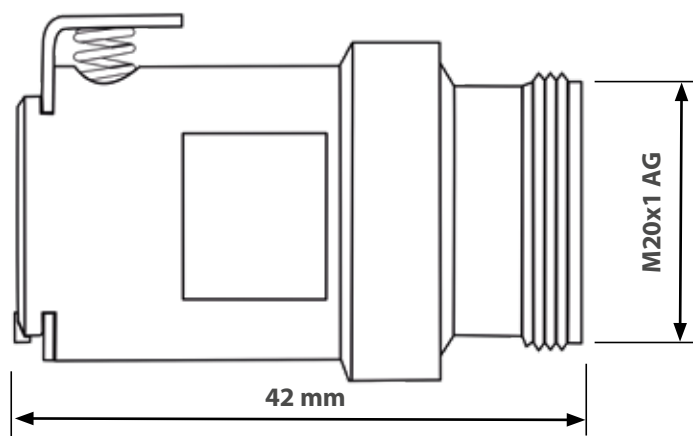


\*Die AquaStopp Funktion verhindert ein ungewolltes Austreten des Wassers, wenn kein Filter installiert ist.  
Variante ohne AquaStopp : Artikelnummer S206020nAS



## Zubehör i3 ONE

### Wasserhahn

<b>Bezeichnung:</b>	<b>M21.5 M Connector ONE (AS)</b>
<b>Artikelnummer:</b>	S206011
<b>Beschreibung:</b>	Schnellverschlusskupplung mit M21,5x1 Außengewinde inklusive AquaStopp Funktion*
<b>Kompatibilität:</b>	i3 ONE Sterilfilter
<b>Anwendung:</b>	Wasserhahn mit einem M21.5x1 Innengewinde
<b>Material:</b>	Edelstahl (Hauptkörper)
<b>Lieferumfang:</b>	1x M22 F Connector ONE (AS) 1x M21.5 M Adaptor 1x M22 Flachdichtung
<b>Installation:</b>	Der Zusammenbau und die Montage der Bauteile muss durch technisches Fachpersonal erfolgen

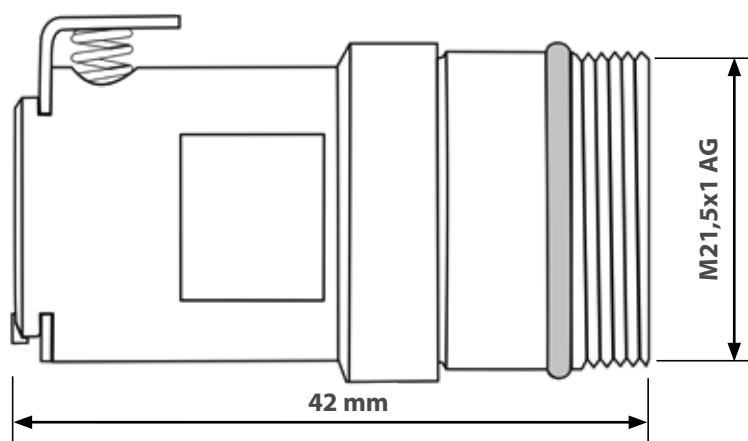


\*Die AquaStopp Funktion verhindert ein ungewolltes Austreten des Wassers, wenn kein Filter installiert ist.  
Variante ohne AquaStopp : Artikelnummer S206011nAS



## Zubehör i3 ONE

### Wasserhahn

<b>Bezeichnung:</b>	<b>M22 F Connector ONE (AS)</b>
<b>Artikelnummer:</b>	2060000
<b>Beschreibung:</b>	Schnellverschlusskupplung mit M22x1 Innengewinde inklusive AquaStopp Funktion*
<b>Kompatibilität:</b>	i3 ONE Sterilfilter
<b>Anwendung:</b>	Wasserhahn mit einem M22x1 Außengewinde
<b>Material:</b>	Edelstahl (Hauptkörper)
<b>Lieferumfang:</b>	1x M22 F Connector ONE (AS) 1x M22 Flachdichtung
<b>Installation:</b>	Der Zusammenbau und die Montage der Bauteile muss durch technisches Fachpersonal erfolgen

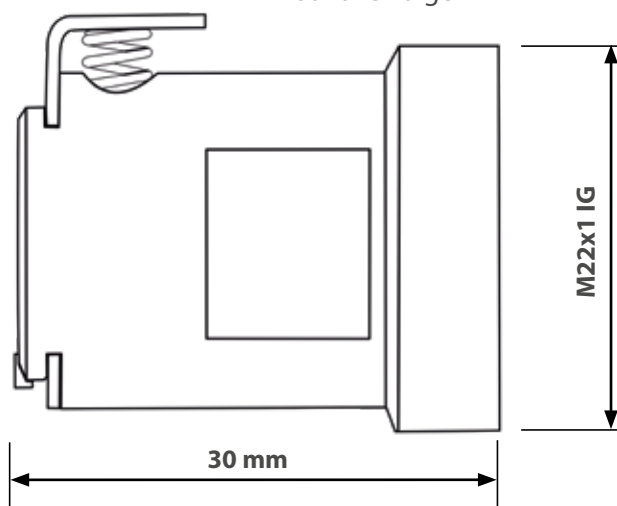


\*Die AquaStopp Funktion verhindert ein ungewolltes Austreten des Wassers, wenn kein Filter installiert ist.  
Variante ohne AquaStopp : Artikelnummer 2060020



## Zubehör i3 ONE

### Wasserhahn

<b>Bezeichnung:</b>	<b>M22 F TEMP Connector ONE (nAS)</b>
<b>Artikelnummer:</b>	S206026
<b>Beschreibung:</b>	Schnellverschlusskupplung mit M22x1 Innengewinde für den temporären Einsatz (max. 150 Tage)
<b>Kompatibilität:</b>	i3 ONE Sterilfilter
<b>Anwendung:</b>	Wasserhahn mit einem M22x1 Außengewinde
<b>Material:</b>	Polyethylen (PE) (Hauptkörper)
<b>Lieferumfang:</b>	1x M24 TEMP Connector ONE (nAS) 1x M24 F - M22 F Adaptor 1x Flachdichtung
<b>Installation:</b>	Der Zusammenbau und die Montage der Bauteile muss durch technisches Fachpersonal erfolgen

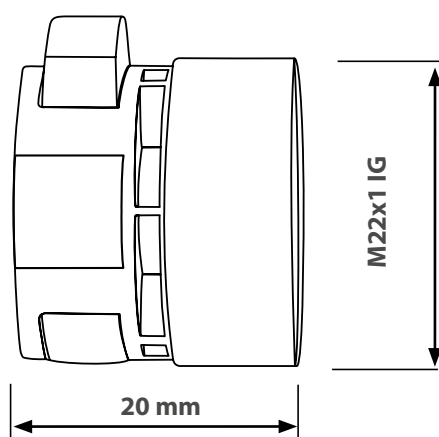




## Zubehör i3 ONE

### Wasserhahn

<b>Bezeichnung:</b>	<b>M24 M Connector ONE (AS)</b>
<b>Artikelnummer:</b>	2060001
<b>Beschreibung:</b>	Schnellverschlusskupplung mit M24x1 Außengewinde inklusive AquaStopp Funktion*
<b>Kompatibilität:</b>	i3 ONE Sterilfilter
<b>Anwendung:</b>	Wasserhahn mit einem M24x1 Innengewinde
<b>Material:</b>	Edelstahl (Hauptkörper)
<b>Lieferumfang:</b>	1x M24 M Connector ONE (AS) 1x M24 Flachdichtung
<b>Installation:</b>	Der Zusammenbau und die Montage der Bauteile muss durch technisches Fachpersonal erfolgen

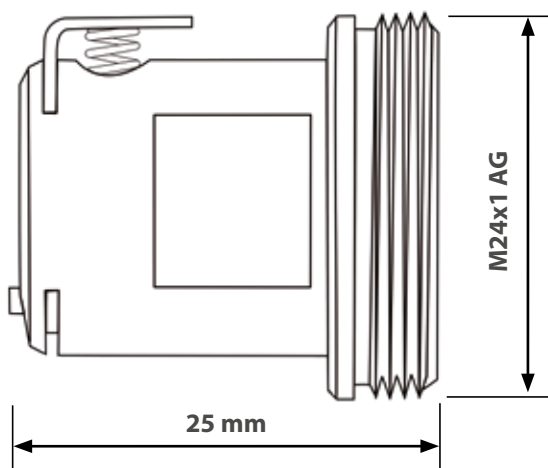


\*Die AquaStopp Funktion verhindert ein ungewolltes Austreten des Wassers, wenn kein Filter installiert ist.  
Variante ohne AquaStopp : Artikelnummer 2060021



## Zubehör i3 ONE

### Wasserhahn

<b>Bezeichnung:</b>	<b>M24 M TEMP Connector ONE (nAS)</b>
<b>Artikelnummer:</b>	S206025
<b>Beschreibung:</b>	Schnellverschlusskupplung mit M24x1 Außengewindegewinde für den temporären Einsatz (max. 150 Tage)
<b>Kompatibilität:</b>	i3 ONE Sterilfilter
<b>Anwendung:</b>	Wasserhahn mit einem M24x1 Innengewinde
<b>Material:</b>	Polyethylen (PE) (Hauptkörper)
<b>Lieferumfang:</b>	1x M24 M TEMP Connector ONE (nAS) 1x Flachdichtung
<b>Installation:</b>	Der Zusammenbau und die Montage der Bauteile muss durch technisches Fachpersonal erfolgen

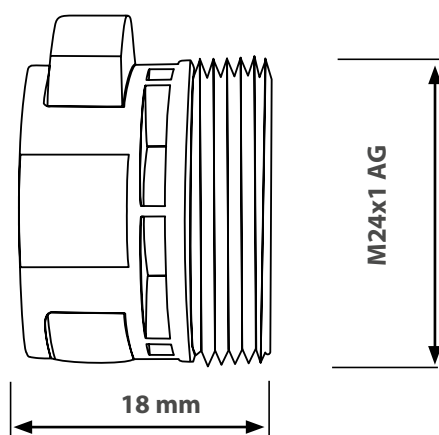




## Zubehör i3 ONE

### Wasserhahn

<b>Bezeichnung:</b>	<b>M28 M Connector ONE (AS)</b>
<b>Artikelnummer:</b>	S206007
<b>Beschreibung:</b>	Schnellverschlusskupplung mit M28x1 Außengewinde inklusive AquaStopp Funktion*
<b>Kompatibilität:</b>	i3 ONE Sterilfilter
<b>Anwendung:</b>	Wasserhahn mit einem M28x1 Innengewinde
<b>Material:</b>	Edelstahl (Hauptkörper)
<b>Lieferumfang:</b>	1x M24 M Connector ONE (AS) 1x M28 M Adaptor 1x M22 Flachdichtung 1x M28 Flachdichtung
<b>Installation:</b>	Der Zusammenbau und die Montage der Bauteile muss durch technisches Fachpersonal erfolgen

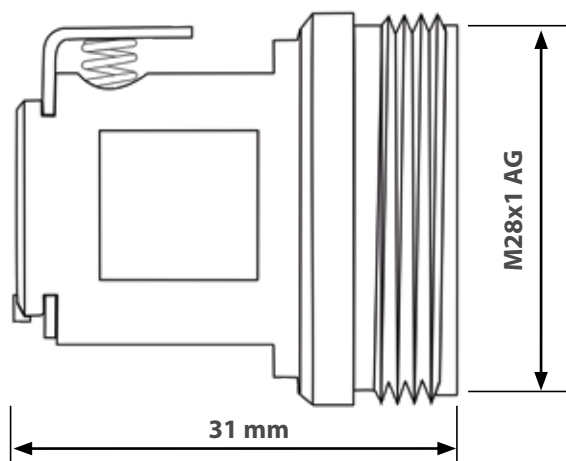

\*Die AquaStopp Funktion verhindert ein ungewolltes Austreten des Wassers, wenn kein Filter installiert ist.  
Variante ohne AquaStopp : Artikelnummer 206021







## Zubehör i3 ONE


### Wasserhahn

<b>Bezeichnung:</b>	<b>Sampling Adaptor</b>
<b>Artikelnummer:</b>	S2060018
<b>Beschreibung:</b>	Einwegadapter zur Entnahme von Wasserproben aus der Schnellverschlusskupplung
<b>Kompatibilität:</b>	i3 ONE / i3 FOUR Schnellverschlusskupplungen
<b>Anwendung:</b>	Wasserprobeentnahme
<b>Material:</b>	POM
<b>Lieferumfang:</b>	10x Sampling Adaptor

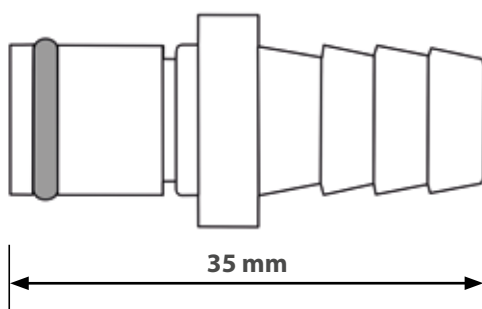

## Zubehör i3 TWO

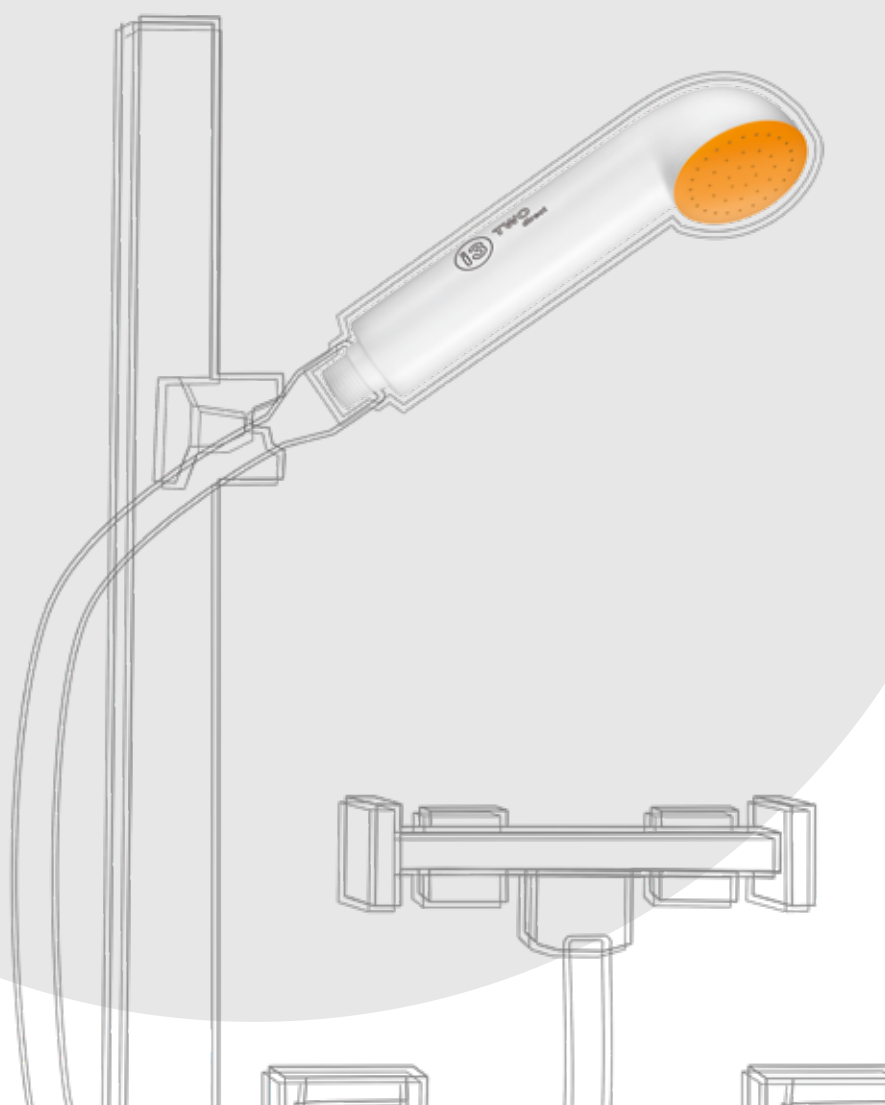


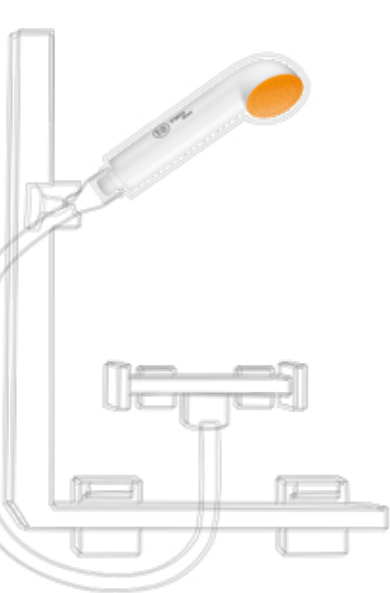

## Zubehör i3 TWO


### Dusche

<b>Bezeichnung:</b>	<b>G1/2" M Connector TWO (AS)</b>
<b>Artikelnummer:</b>	2060002
<b>Beschreibung:</b>	Schnellverschlusskupplung mit G1/2" Außengewinde inklusive AquaStopp Funktion*
<b>Kompatibilität:</b>	i3 TWO connect Sterilfilter
<b>Anwendung:</b>	Duschschlauch mit einem G1/2" Innengewinde
<b>Material:</b>	PSU (Hauptkörper)
<b>Lieferumfang:</b>	1x G1/2" M Connector TWO (AS) 1x 1/2" Flachdichtung
<b>Installation:</b>	Der Zusammenbau und die Montage der Bauteile muss durch technisches Fachpersonal erfolgen

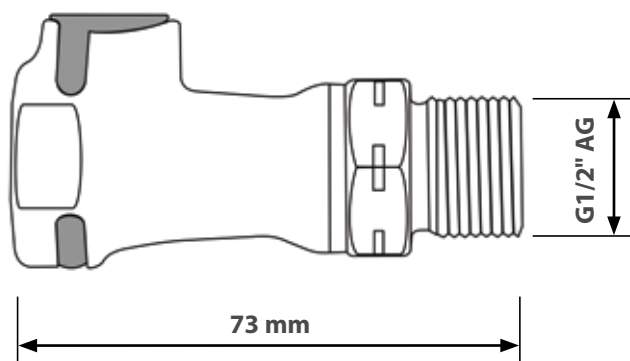

\*Die AquaStopp Funktion verhindert ein ungewolltes Austreten des Wassers, wenn kein Filter installiert ist.  
Variante ohne AquaStopp : Artikelnummer 206022

## Zubehör i3 FOUR

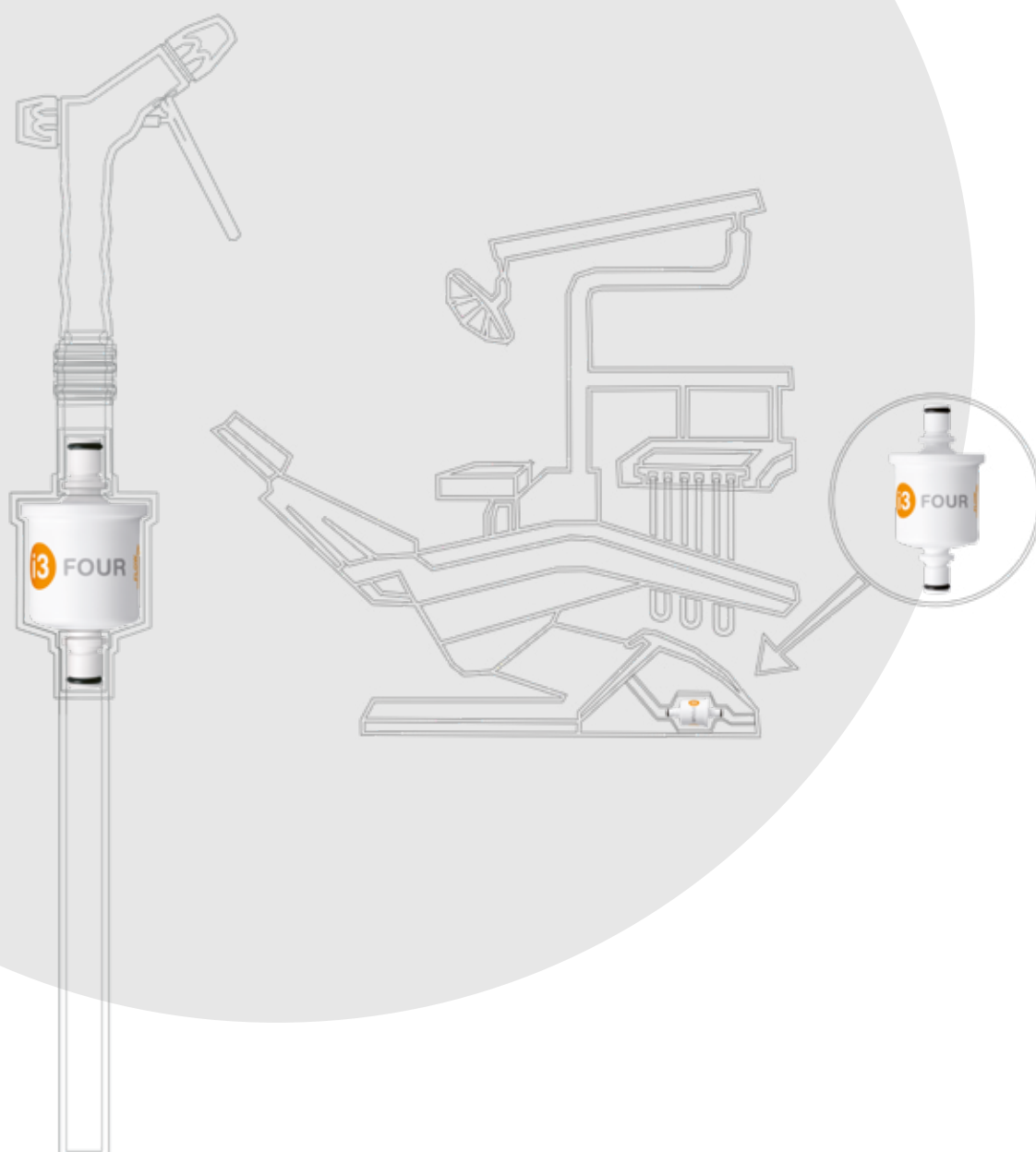




## Zubehör i3 FOUR

### Inline

<b>Bezeichnung:</b>	<b>G3/8" M Connector FOUR (AS)</b>
<b>Artikelnummer:</b>	2060005
<b>Beschreibung:</b>	Schnellverschlusskupplung mit G3/8" Außengewinde inklusive AquaStopp Funktion*
<b>Kompatibilität:</b>	i3 FOUR Inlinefilter
<b>Anwendung:</b>	Dentaleinheiten; HNO-Einheiten; Flexschläuche mit einem G3/8" Innengewinde
<b>Material:</b>	Edelstahl (Hauptkörper)
<b>Lieferumfang:</b>	1x G3/8" M Connector FOUR (AS)
<b>Installation:</b>	Der Zusammenbau und die Montage der Bauteile muss durch technisches Fachpersonal erfolgen

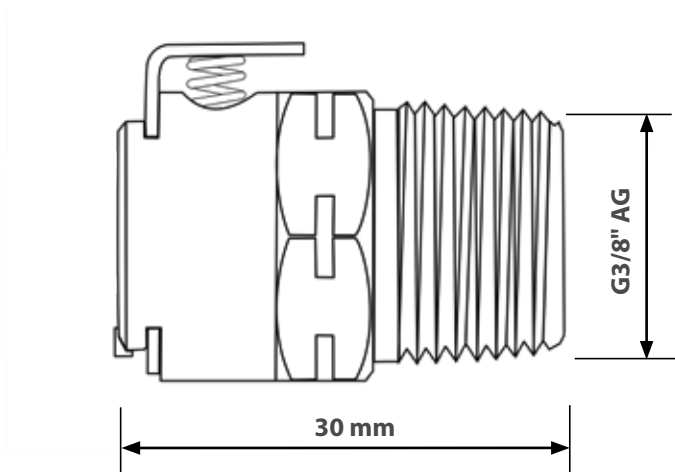


\*Die AquaStopp Funktion verhindert ein ungewolltes Austreten des Wassers, wenn kein Filter installiert ist.



## Zubehör i3 FOUR

### Inline

<b>Bezeichnung:</b>	<b>G1/2" M Connector FOUR (nAS)</b>
<b>Artikelnummer:</b>	2060060
<b>Beschreibung:</b>	Schnellverschlusskupplung mit G1/2" Außengewinde ohne AquaStopp Funktion*
<b>Kompatibilität:</b>	i3 FOUR Inlinefilter
<b>Anwendung:</b>	Reinigungspistolen mit einem G1/2" Innengewinde
<b>Material:</b>	Edelstahl (Hauptkörper)
<b>Lieferumfang:</b>	1x G1/2" M Connector FOUR (AS) 1x 1/2" Flachdichtung
<b>Installation:</b>	Der Zusammenbau und die Montage der Bauteile muss durch technisches Fachpersonal erfolgen

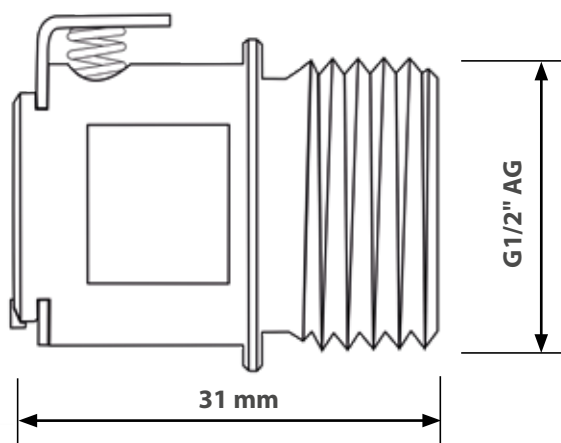


\*Die AquaStopp Funktion verhindert ein ungewolltes Austreten des Wassers, wenn kein Filter installiert ist.



## Zubehör i3 FOUR

### Inline

<b>Bezeichnung:</b>	<b>G1/2" F Connector FOUR (AS)</b>
<b>Artikelnummer:</b>	2060061
<b>Beschreibung:</b>	Schnellverschlusskupplung mit G1/2" Innengewinde mit AquaStopp Funktion*
<b>Kompatibilität:</b>	i3 FOUR Inlinefilter
<b>Anwendung:</b>	Reinigungspistolen mit einem G1/2" Außengewinde
<b>Material:</b>	Edelstahl (Hauptkörper)
<b>Lieferumfang:</b>	1x G1/2" F Connector FOUR (AS) 1x G1/2" Flachdichtung
<b>Installation:</b>	Der Zusammenbau und die Montage der Bauteile muss durch technisches Fachpersonal erfolgen

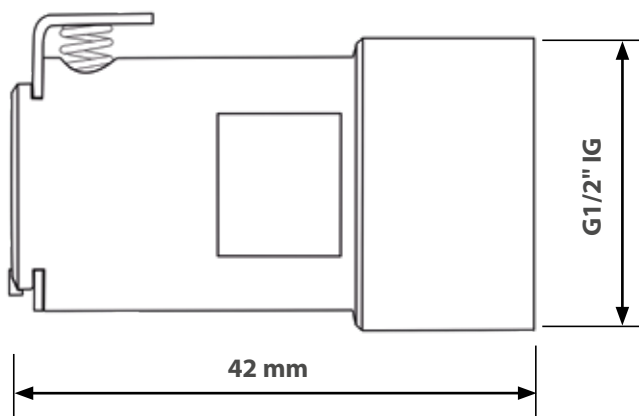

\*Die AquaStopp Funktion verhindert ein ungewolltes Austreten des Wassers, wenn kein Filter installiert ist.




## Zubehör i3 FOUR

### Inline

<b>Bezeichnung:</b>	<b>Adaptor Lock</b>
<b>Artikelnummer:</b>	2060071
<b>Beschreibung:</b>	Sicherung gegen ungewolltes Auslösen der Schnellverschlusskupplung
<b>Kompatibilität:</b>	i3 FOUR Inlinefilter G3/8" M Connector FOUR (AS)
<b>Anwendung:</b>	Sicherung von Inline-Schnellverschlusskupplungen
<b>Material:</b>	ABS
<b>Lieferumfang:</b>	10 x Adaptor Lock




offen

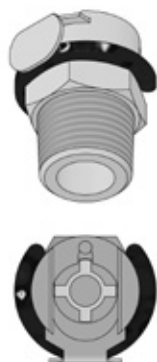


geschlossen



## Zubehör i3 FIVE

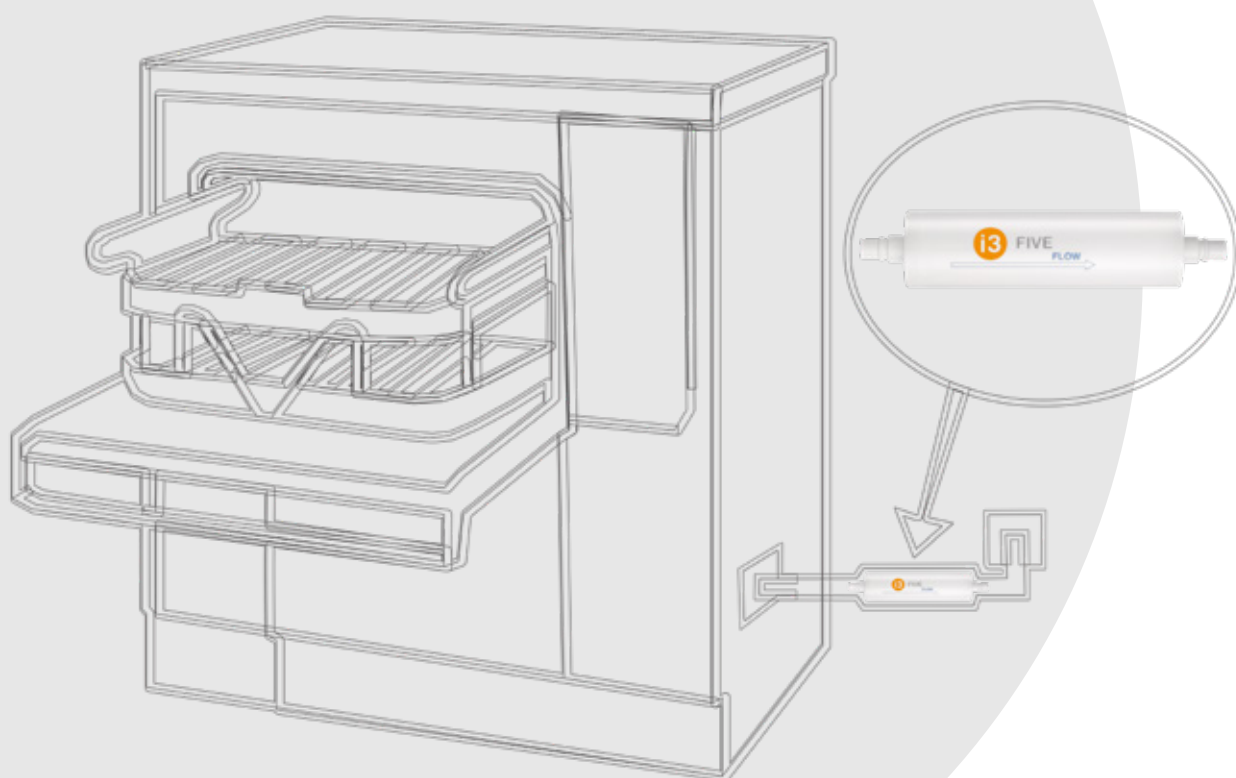


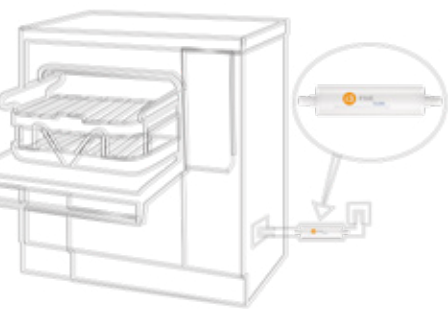


## Zubehör i3 FIVE

### Inline

<b>Bezeichnung:</b>	<b>G3/8" M Connector FIVE (AS)</b>
<b>Artikelnummer:</b>	2060084
<b>Beschreibung:</b>	Schnellverschlusskupplung mit G3/8" Außengewinde mit AquaStopp Funktion*
<b>Kompatibilität:</b>	i3 FIVE Inlinefilter
<b>Anwendung:</b>	RDG-E; Geburtswannen; Flexschläuche mit einem G3/8" Innengewinde
<b>Material:</b>	POM (Hauptkörper)
<b>Lieferumfang:</b>	1x G3/8" M Connector FIVE (AS)
<b>Installation:</b>	Der Zusammenbau und die Montage der Bauteile muss durch technisches Fachpersonal erfolgen

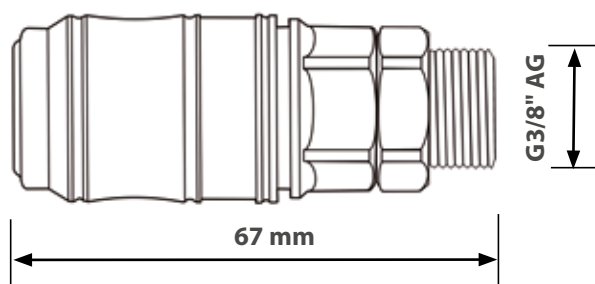


\*Die AquaStopp Funktion verhindert ein ungewolltes Austreten des Wassers, wenn kein Filter installiert ist.

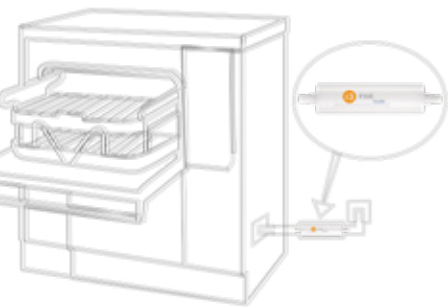


## Zubehör i3 FIVE

### Inline

<b>Bezeichnung:</b>	<b>G1/2" M Connector FIVE (AS)</b>
<b>Artikelnummer:</b>	2060050
<b>Beschreibung:</b>	Schnellverschlusskupplung mit G1/2" Außengewinde mit AquaStopp Funktion*
<b>Kompatibilität:</b>	i3 FIVE Inlinefilter
<b>Anwendung:</b>	RDG-E; Geburtswannen; Flexschläuche mit einem G1/2" Innengewinde
<b>Material:</b>	POM (Hauptkörper)
<b>Lieferumfang:</b>	1x G1/2" M Connector FIVE (AS)
<b>Installation:</b>	Der Zusammenbau und die Montage der Bauteile muss durch technisches Fachpersonal erfolgen

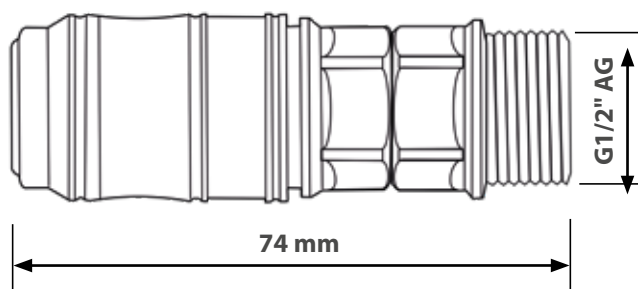


\*Die AquaStopp Funktion verhindert ein ungewolltes Austreten des Wassers, wenn kein Filter installiert ist.

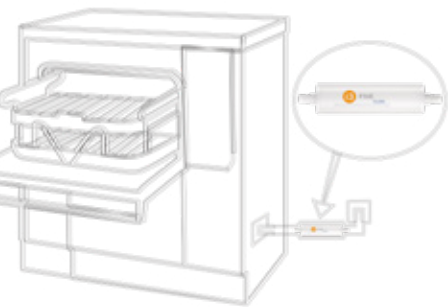


## Zubehör i3 FIVE

### Inline

<b>Bezeichnung:</b>	<b>G1/2" F Connector FIVE (AS)</b>
<b>Artikelnummer:</b>	2060054
<b>Beschreibung:</b>	Schnellverschlusskupplung mit G1/2" Innengewinde mit AquaStopp Funktion*
<b>Kompatibilität:</b>	i3 FIVE Inlinefilter
<b>Anwendung:</b>	RDG-E; Geburtswannen; Flexschläuche mit einem G1/2" Außengewinde
<b>Material:</b>	POM (Hauptkörper)
<b>Lieferumfang:</b>	1x G1/2" F Connector FIVE (AS)
<b>Installation:</b>	Der Zusammenbau und die Montage der Bauteile muss durch technisches Fachpersonal erfolgen

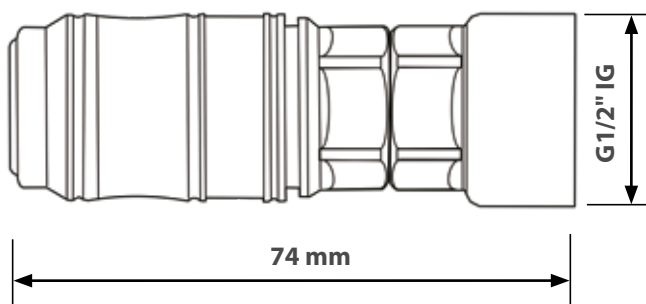


\*Die AquaStopp Funktion verhindert ein ungewolltes Austreten des Wassers, wenn kein Filter installiert ist.

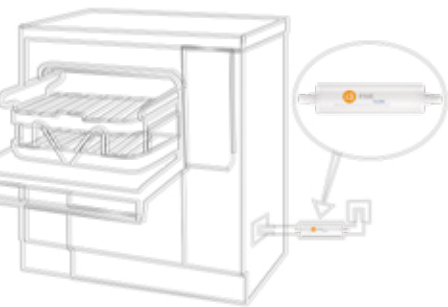


## Zubehör i3 FIVE

### Inline

<b>Bezeichnung:</b>	<b>G3/4" M Connector FIVE (AS)</b>
<b>Artikelnummer:</b>	S206005
<b>Beschreibung:</b>	Schnellverschlusskupplung mit G3/4" Außengewinde mit AquaStopp Funktion*
<b>Kompatibilität:</b>	i3 FIVE Inlinefilter
<b>Anwendung:</b>	RDG-E; Geburtswannen; Flexschläuche mit einem G3/4" Innengewinde
<b>Material:</b>	POM (Hauptkörper)
<b>Lieferumfang:</b>	1x G1/2" M Connector FIVE (AS) 1x G3/4" M Adaptor
<b>Installation:</b>	Der Zusammenbau und die Montage der Bauteile muss durch technisches Fachpersonal erfolgen

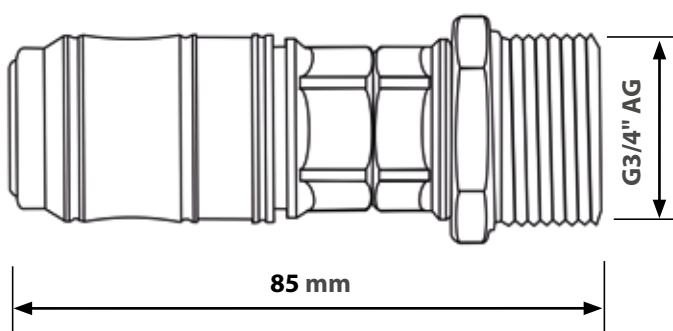


\*Die AquaStopp Funktion verhindert ein ungewolltes Austreten des Wassers, wenn kein Filter installiert ist.

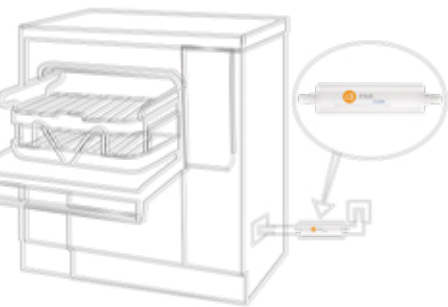


## Zubehör i3 FIVE

### Inline

<b>Bezeichnung:</b>	<b>G3/4" F Connector FIVE (AS)</b>
<b>Artikelnummer:</b>	S206003
<b>Beschreibung:</b>	Schnellverschlusskupplung mit G3/4" Innengewinde mit AquaStopp Funktion*
<b>Kompatibilität:</b>	i3 FIVE Inlinefilter
<b>Anwendung:</b>	RDG-E; Geburtswannen; Flexschläuche mit einem G3/4" Außengewinde
<b>Material:</b>	POM (Hauptkörper)
<b>Lieferumfang:</b>	1x G1/2" M Connector FIVE (AS) 1x G3/4" F Adaptor
<b>Installation:</b>	Der Zusammenbau und die Montage der Bauteile muss durch technisches Fachpersonal erfolgen

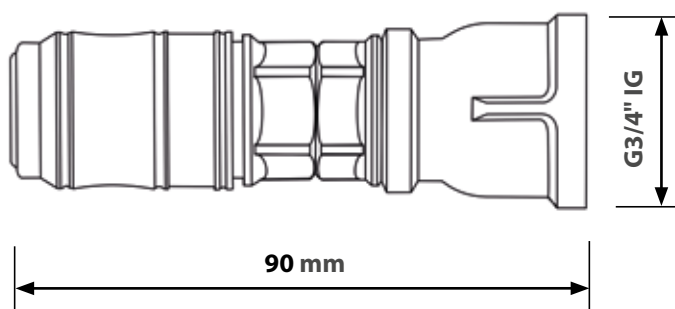


\*Die AquaStopp Funktion verhindert ein ungewolltes Austreten des Wassers, wenn kein Filter installiert ist.

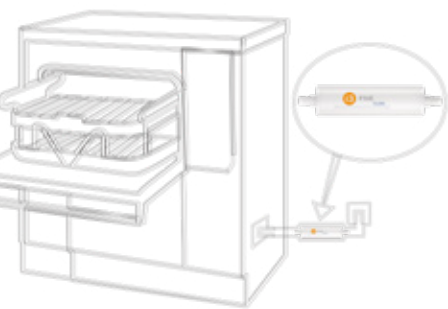

## Zubehör i3 FIVE

### Inline

<b>Bezeichnung:</b>	<b>Wall Mount FIVE</b>
<b>Artikelnummer:</b>	2060052
<b>Beschreibung:</b>	Wandbefestigung für den i3 FIVE
<b>Kompatibilität:</b>	i3 FIVE Inlinefilter
<b>Anwendung:</b>	Halterung zur Befestigung des i3 FIVE Inlinefilters
<b>Material:</b>	Santopren (Hauptkörper)
<b>Lieferumfang:</b>	1x Wall Mount FIVE 1x Montageset
<b>Installation:</b>	Der Zusammenbau und die Montage der Bauteile muss durch technisches Fachpersonal erfolgen

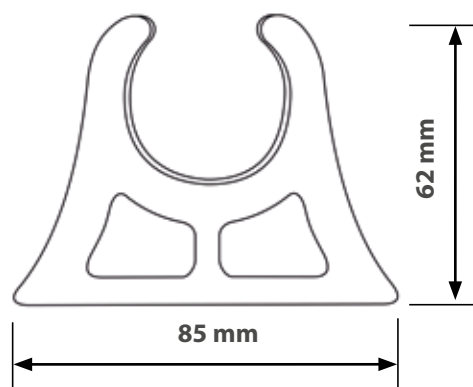

\*Die AquaStopp Funktion verhindert ein ungewolltes Austreten des Wassers, wenn kein Filter installiert ist.



# Übersicht Zubehör i3 ONE

i3 ONE Wasserhahn		
Abbildung	Bezeichnung	Artikel- Nummer
	M16 F Connector ONE (AS)	S206015
	M16.5 M Connector ONE (AS)	S206024
	M18 M Connector ONE (AS)	S206013
	M18.5 M Connector ONE (AS)	S206012
	M20 M Connector ONE (AS)	S206020
	M21.5 M Connector ONE (AS)	S206011





# Übersicht Zubehör i3 ONE


i3 ONE Wasserhahn		
Abbildung	Bezeichnung	Artikel- Nummer
	M22 F Connector ONE (AS)	2060000
	M22 F TEMP Connector ONE (nAS)	S206026
	M24 M Connector ONE (AS)	2060001
	M24 F TEMP Connector ONE (nAS)	S206025
	M28 M Connector ONE (AS)	S206007
	Sampling Adaptor	S2060018

# Übersicht Zubehör

i3 TWO  
i3 FOUR



## i3 TWO Dusche

Abbildung	Bezeichnung	Artikel- Nummer
	G1/2" M Connector TWO (AS)	2060002









## i3FOUR Inline

Abbildung	Bezeichnung	Artikel- Nummer
	G3/8" M Connector FOUR (AS)	2060005
	G1/2" M Connector FOUR (AS)	2060060
	G1/2" F Connector FOUR (AS)	2060061
	Adaptor Lock	2060071

# Übersicht Zubehör i3 FIVE



i3 FIVE Inline		
Abbildung	Bezeichnung	Artikel- Nummer
	G3/8" M Connector FIVE (AS)	2060084
	G1/2" M Connector FIVE (AS)	2060050
	G1/2" F Connector FIVE (AS)	2060054
	G3/4" M Connector FIVE (AS)	S206005
	G3/4" F Connector FIVE (AS)	S206003
	Wall Mount FIVE	2060052

